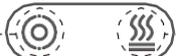


商品企画提案書

	ブランド名		商品名			
	KINGDOM CARES®		首マッサージャー			
	JANコード	4582591240219 (白) 4582591240202 (ピンク)	発売元	K・SKIN株式会社		
	型番	KC3388	住所	東京都台東区台東1-27-11やわらぎビル1F		
	上代 (税抜き)	8800円	入数	20		
	上代 (税込)	9680円	ロット	20		
	本体(mm)		梱包(mm)		外箱(mm)	
	幅	153	幅	183	幅	385
	奥行き	450	奥行き	183	奥行き	308
	高さ	40	高さ	54	高さ	386
	総重量	172g	重量	382g	重量	8.8kg
発売日		原産国	日本			

商品説明	<ul style="list-style-type: none"> ・本体の操作ボタンとモバイルで操作可能です。 ・本製品は自動電源オフ機能を備えています。作動してから約10分で自動的に電源がオフになります。 ・6種類のモードと9段階の強度調節が可能です。調子に合わせてモードと強度が選べます。 ・肌に触れる部分がシリコン素材のため、心地よい使用感が体感できます。
------	---

使用方法	<p>モードを切り替える 本体の「モード切替ボタン」を短押しすることで、モードの切り替えができます。現在選択されているモードは表示パネルにてご確認ください。 ※モードを切り替えると、強度はパワー1に戻ります。</p> <p>強度を調節する 本体の「強ボタン」または「弱ボタン」を短押しすることで、刺激の強度を調節できます。現在選択されている強度は表示パネルにてご確認ください。</p> <p>電源をオフにする 電源ボタンを2秒ほど長押しして電源をオフにします。</p> <p>ヒーターをオンまたはオフにする 本体の「ヒーターオン/オフボタン」を短押しすることで、ヒーターのオン/オフが切り替えられます。ヒーターがオンになっている場合のみ表示パネルに絵表示が表示されます。</p> <p>モード切替ボタン ---  --- ヒーターオン/オフボタン</p> <p>弱ボタン ---  --- 強ボタン</p>
------	---

使用上の注意	<ul style="list-style-type: none"> ❶ 使いはじめや敏感肌の方は、必ずお肌の様子をみながら使用してください。 肌トラブルの原因になります。 ❷ 使用時間は1回10分、1日2回までを目安にご使用ください。 過度な使用は肌トラブルをおこす原因になります。 ❸ 使用するときは、電源スイッチなど各機能が正しく作動することを確認してからご使用ください。 ❹ しばらく使用しなかったときは、製品が正常に作動することを確認してから使用してください。 事故やけがのおそれがあります。 ❺ 使用中に身体に異常(めまい、冷や汗、吐き気、脈拍の乱れ、動機など)を感じたときは、直ちに使用を中止してください。 事故や体調不良をおこすおそれがあります。
--------	--

保管時の注意	<ul style="list-style-type: none"> ・乾いた柔らかい素材の布で汚れをふき取ってください。 ・必ず電源をオフにしてから、充電中の場合は充電を終了してから保管ください。 ・水洗いはできません。 ・直射日光の当たる場所、浴室などの高温多湿な場所には保管しないでください。 ・お子様の手の届かない場所で保管してください。 <p>※上記の項目を守って頂けない場合はやけど、火災の原因又は故障や破損を引き起こす恐れがありまた、周囲の物を変形、変色させる可能性がありますので、保管時には十分ご注意ください。</p>
--------	--